

Wagner Guder Einheiten:

Untersuchungseinheit cubeEVO

Reinigung

Reinigen Sie die Lackteile und die Sitzpolsterung an der cubeEVO ausschließlich mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungszusätzen. Hartnäckige Verschmutzungen an Lackflächen können mit Waschbenzin oder Spiritus entfernt werden. Wiederholende Anwendung kann zu Farbveränderungen der Bauteile führen!

Die Gerätetischplatte ist mit einer Kunststoffoberfläche versehen. Hier dürfen auch Desinfektionsmittel zur Reinigung verwendet werden.

Für Reinigungsarbeiten an den installierten Untersuchungsgeräten folgen Sie bitte den Hinweisen und Erläuterungen des jeweiligen Geräteherstellers oder erkundigen sich bei autorisiertem Fachpersonal.

Primatron Einheiten

10. Wartung und Pflege

10.1. Pflege



Achtung!

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Falls Sie einen Wandanschlusskasten (WAK) benutzen, schalten Sie die Einheit am Hauptschalter des WAK aus.

Anschließend reinigen Sie die Einheit mit einem sauberen, leicht angefeuchtetem Ledertuch. Verwenden Sie KEINE scheuernden, aggressiven, alkohol- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel! Zum Reinigen der Oberflächen können Sie auch eine milde Seifenlauge verwenden. Reiben Sie die Flächen sanft trocken. Benutzen Sie die Einheit erst wieder, wenn die betroffenen Flächen vollständig getrocknet sind!



Wichtig!

Die Linearführungen dürfen ausschließlich trocken gereinigt werden!